

VICRYL PLUS* (Полиглактин 910 с антисептическим покрытием)

Синтетический рассасывающийся
полифиламентный шовный материал



VICRYL PLUS (Полиглактин 910 с антисептическим покрытием)

VICRYL PLUS – синтетическая хирургическая плетеная нить со средним сроком рассасывания, обработанная антисептиком (триклозаном). Применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур. Нить имеет антисептическое покрытие IRGACARE MP* (триклозан) для предупреждения контаминации шовного материала патогенными бактериями⁹.

Сроки рассасывания

Благодаря реакции гидролиза у нити VICRYL PLUS толщиной 6-0 USP и более в течение срока имплантации в ране уменьшается показатель прочности на разрыв.

Дни имплантации	Остаточная прочность
14 суток	75%
21 сутки	50%
28 суток	25%

Срок полного рассасывания – 56 - 70 дней

Покрывание IRGACARE MP (триклозан)

Шовный материал VICRYL PLUS имеет зону ингибирования роста бактерий, которые являются факторами развития инфекции области хирургического вмешательства⁹.






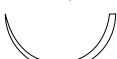


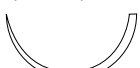



Триклозан – антисептическое средство широкого спектра действия, подавляющего рост главных возбудителей инфекций области хирургического вмешательства в течение первых нескольких суток после имплантации нити, не является антибиотиком и в данной концентрации (не более 270 мкг/м) не токсичен.

Спектр антибактериальной активности покрытия IRGACARE (триклозан) *in vitro*⁸:

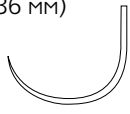




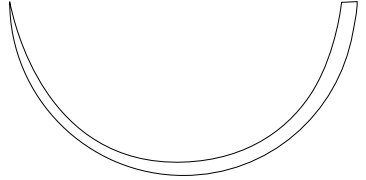
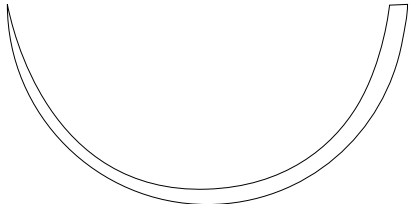
Грамположительные

- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis
- MRSA
- MRSE

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити							Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
⊙ RB-2 (13 мм) 	45							VCP9982H	36
	70						VCP434H	VCP433H	36
⊖ TF PLUS (13 мм)  flat end	70						VCP924H	36	
⊖ RB-1 PLUS (17 мм) 	70				VCP306H	VCP305H	VCP214H VCP304H	VCP303H	36
⊙ CT-3 (22 мм) 	70				VCP328H				36
⊖ SH-1 PLUS (22 мм) VISI Black  уплощенный кончик	70					VCP3110H			36
⊖ SH-1 PLUS (22 мм)  уплощенный кончик	70				VCP312H	VCP311H	VCP310H		36
⊙ MO-7 (22 мм) 	70	VCP251H	VCP250H						36
⊖ SH PLUS (26 мм)  уплощенный кончик	70			VCP318H	VCP317H	VCP316H	VCP315H		36
	90			VCP244H		VCP242H			36
⊙ CT-2 (26 мм) 	90		VCP331H	VCP330H	VCP326H				36
⊙ MH-1 (31 мм) 	70					VCP319H			36
⊖ MH-1 PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	70		VCP9213H	VCP247H	VCP320H				36
⊖ MH PLUS (36 мм)  уплощенный кончик	70		VCP325H	VCP324H	VCP323H	VCP322H			36


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
Ⓞ ASH-35 (36 мм) 	70			VCP9221H ■		36
Ⓞ CT-1 (36 мм) 	90	VCP348H ■	VCP347H ■	VCP346H ■	VCP345H ■	36
Ⓞ CT (40 мм) 	70		VCP353H ■	VCP352H ■	VCP351H ■	36
	90	VCP360H ■	VCP359H ■	VCP358H ■		36
Ⓞ MO-45 (45 мм) 	70	VCP9246H ■	VCP9245H ■			36
Ⓞ CTX (48 мм) 	90	VCP372H ■	VCP371H ■	VCP370H ■		36
Ⓞ XLH (70 мм) 	120		VCP584G ■			12
Ⓞ MO-80 (80 мм) 	100		VCP9289G ■			12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	4/0 (M1,5)	
Ⓞ C-1 (13 мм) 	70		VCP9067H ■	36
⊖ BB PLUS (17 мм)  уплощенный кончик	45		VCP9074H ■	36
⊖ TE PLUS (31 мм)  уплощенный кончик	70	VCP1036H ■		36

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 5/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	
● UR-6 (26 мм) 	70	VCP603H ■	VCP602H ■		36
● UR-6 (26 мм) 	90		VCP2593H ■		36
● MF (31 мм) 	70			VCP308H □	36
● UR-5 (36 мм) 	70	VCP376H ■			36




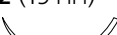



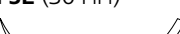
ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
● BP-5 (65 мм) 	100	VCP9391G ■	12

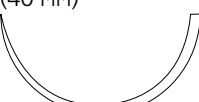
ТУПОКОНЕЧНАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	
● CTD (40 мм) 	90	VCP9996H ■	36









ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	
▼ P-3 PRIME (13 мм) 	45				VCP494H ■	VCP493H ■	36
▼ PS-3 (16 мм) 	45					VCP500H ■	36
▼ FS-3 (16 мм) 	70			VCP395H ■			36
▼ FS-2 (19 мм) 	70				VCP397H ■ VCP422H ■		36
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45			VCP497H ■	VCP496H ■		36
▼ FS-1 (24 мм) 	70			VCP442H ■ VCP452H ■			36
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	45		VCP684H ■	VCP683H ■			36
▼ FSL (30 мм) 	70	VCP587H ■	VCP586H ■	VCP585H ■			36


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	
▼ CP (40 мм) 	70			VCP479H ■	36
	90		VCP486H ■		36
▼ CPX (48 мм) 	70			VCP9295H ■	36
	90	VCP1059H ■	VCP1058H ■		36

КОЛЮЩЕ -РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
 V-5 (17 мм)	70			VCP987H			VCP994H	36
 V-6 (22 мм)	70				VCP278H			36
 V-7 (26 мм)	70				VCP999H	VCP998H		36
 V-30 (31 мм)	70		VCP9362H	VCP9361H	VCP9360H			36
 V-34 (36 мм)	90	VCP520H	VCP519H	VCP518H	VCP517H	VCP516H		36
 V-37 (40 мм)	70			VCP9901H	VCP9900H			36
	90		VCP9468H					36
 V-39 (45 мм)	70	VCP9378H	VCP9377H	VCP9376H	VCP9375H			36
 V-40 (48 мм) петля	150		VCP829E					24

КОЛЮЩЕ -РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
 V-4 (17 мм)	70	VCP9826H	VCP240H	36

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити		Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45		VCP9507H	36
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	70		VCP9571H	36
▲ PC-25 PRIME (26 мм) 	70	VCP9582H		36
▲ PCLX PRIME (36 мм) 	70	VCP9532H	VCP9531H	36

БЕЗ ИГЛЫ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити						Кол-во в коробке
		2 (M5)	1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	
БЕЗ ИГЛЫ	5x70					VCP1215E		24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70					VCP624E		24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70				VCP1216E			24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70				VCP625E			24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70			VCP1217E				24
БЕЗ ИГЛЫ	2x70			VCP626E				24
БЕЗ ИГЛЫ	5x70		VCP1218H					36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70		VCP627H					36
БЕЗ ИГЛЫ	5x70	VCP1219H						36
БЕЗ ИГЛЫ	2x70	VCP628H						36
БЕЗ ИГЛЫ	5x70						VCP1214E	24